


1.



Pamiętaj o zabraniu do szpitala swojego Elle Tens wraz z kompletem elektrod oraz przewodów.

2.

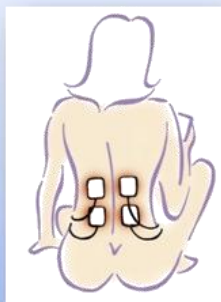

Poproś o pomoc (położną, kogoś z rodziny itp.) przy instalowaniu elektrod na swoim ciele.

3.



Uruchom urządzenie a następnie zwiększ intensywność impulsów w obu kanałach przyciskając przyciski CH1+ i CH2+.

Poczujesz pulsowanie/łaskotanie - okresowo włączane i wyłączane.

4.



Gdy pojawi się skurcz naciśnij przycisk BOOST znajdujący się z prawej górnej strony urządzenia. Będziesz odczuwać ciągłe pulsowanie.

Gdy skurcz minie – zwolnij przycisk BOOST

5.



W ostatniej fazie porodu wykorzystaj przycisk OPTI-MAX.

Funkcja ta zapewnia jeszcze większą wszechstronność zastosowania Elle Tens – przydatna zwłaszcza gdy potrzebujesz dodatkowego wzmocnienia.